

# PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE.



## 01 LAVAGEM / LIMPEZA PRÉVIA

Deixar os instrumentos na imersão dentro de depósito plástico com tampa, em solução de detergente enzimático, seguindo as recomendações de diluição e tempo de imersão determinada pelo fabricante.

Lavar em água corrente, na pia exclusiva e com auxílio de escova pequena e macia. Em seguida enxaguar em água corrente.

## 02 SECAGEM / INSPEÇÃO VISUAL

Secar o instrumental um a um com toalhas de tecido de algodão que não soltem fiapos e que sejam de uso exclusivo. As toalhas de tecido devem ser trocadas a cada ciclo de esterilização. Depois de secos, o operador deve fazer uma inspeção visual de todo o instrumental, verificando as áreas de maior dificuldade e proceder a remoção mecânica, se necessário.

## 03 EMBALAGEM DO MATERIAL

Os instrumentos secos devem ser embalados em papel grau cirúrgico, com fita adesiva incorporada, e/ou fechados em máquina seladora. Proteger as pontas dos instrumentos perfuro- cortantes com gaze ou algodão para evitar que furem os pacotes, inutilizando-os.

## 04 ACONDICIONAMENTO

Os instrumentos embalados, únicos ou em kits, são posicionados no equipamento de forma a permitir uma livre circulação de ar entre eles. Não devem ficar amontoados e nem encostados nas paredes internas do equipamento. Previamente o equipamento é abastecido com água destilada e na quantidade específica conforme instruções do fabricante.

## 05 ESTERILIZAÇÃO

O operador fecha a porta do equipamento e escolhe o modo automático para dar início ao processo.

## 06 IDENTIFICAÇÃO

Depois de esterilizados, os instrumentos são retirados do equipamento e identificados com o nome do profissional, data da esterilização e validade. Preconiza a validade de 7 (sete) dias.

## 07 GUARDA DO MATERIAL UTILIZADO

Os instrumentos esterilizados são acondicionados em depósitos plásticos com tampa e/ou gavetas dos armários, jamais em local com umidade, calor, poeira e/ou incidência de sol.

**OBSERVAÇÃO:** Mensalmente deve ser realizada a monitoração do processo de esterilização com indicadores biológicos (Teste Biológico) e os resultados registrados para comprovação da efetividade do processo.

*Este cartaz foi cedido pela NUTHS a este estabelecimento com o propósito de conscientizar seus colaboradores quanto a procedimentos importantes de manutenção da segurança sanitária e alimentar deste ambiente. Este cartaz não significa ou atesta nenhum vínculo de prestação de serviços a este estabelecimento. Para comprovação do vínculo, faz-se necessária a apresentação do contrato em vigência.*